


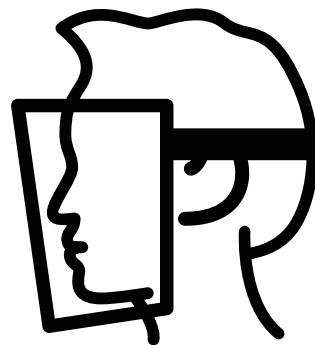

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYŁBICY OCHRONNEJ NA TWARZ

1. Rozpakować oraz wyprostować pasek montażowy.
2. Przewlec pasek montażowy przez przednią szybę zgodnie z poniższym schematem.
Proszę wykorzystać otwory w pasku do lekkiego zgięcia w pionie, znacznie ułatwi to przewleczenie go przez otwory w przedniej szybie.
3. Wyregulować opaskę do odpowiedniego obwodu głowy.

• **CHROŃ SIEBIE I BLISKICH!**

Schemat montażu pasa montażowego do maski (widok z góry)

SPONSORZY




MELER-ART



GAMAR



Tobiański Kamil
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

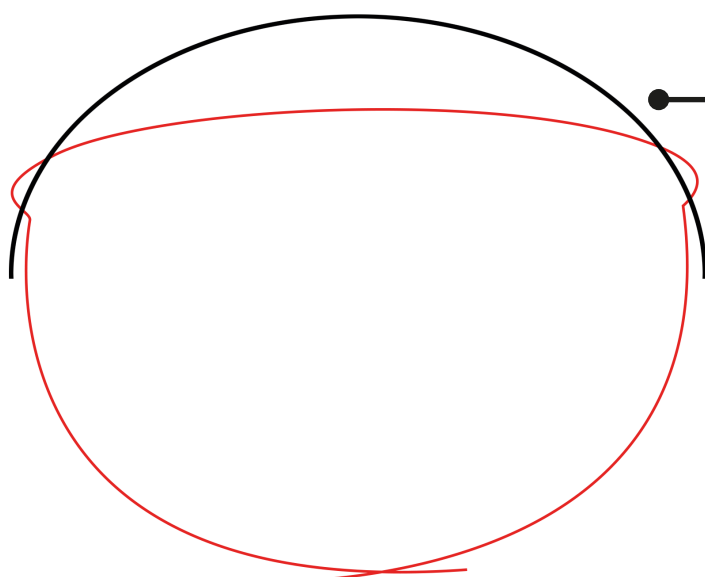

oraz:

Gros-Rol Sp. z o. o. / Fermy Drobiu Wysoccy-Delewski / Pelplińscy samorządowcy